



CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA

PRODUTO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO

- Componentes: CATETER e SERINGA.

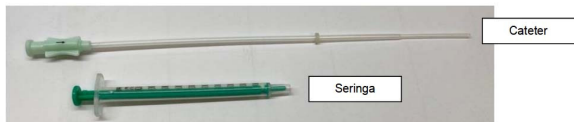

- O CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA é usado para a introdução de espermatozóides lavados na cavidade uterina através do colo do útero.

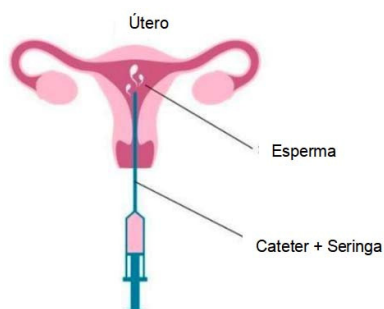

- Esterilizado por Óxido de Etileno.

Tamanhos:

- Cateter: 22cm
- Seringa: 1mL

Indicação de uso:

- O CATETER DE INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA é usado para a introdução de espermatozóides lavados na cavidade uterina através do colo do útero.

Modo de Uso:

1. Posicione a paciente em posição de litotomia. Insira o espécule vaginal para expor o colo do útero e decidir o comprimento de inserção do cateter.
2. Lave a vagina com soro fisiológico esterilizado e seque-a.
3. Conecte a seringa ao conector do cateter.
4. Carregue o cateter com solução de esperma lavada.
5. Insira o cateter no colo do útero.
6. Após a inserção na cavidade uterina, pressione lentamente a seringa e expulse a solução de esperma ou lavada espermatozóides na cavidade uterina.
7. Remova cuidadosamente o cateter.
8. Descarte a seringa e o cateter como produto de risco biológico.

Formas de apresentação:

- Embalagem primária: Kit acondicionado em embalagem de papel grau cirúrgico + tyvek.
- Embalagem secundária: acondicionado em papel cartolina.

Condições de Armazenamento e Transporte:

- Estocar em local seco, fresco e protegido da luz solar, à temperatura ambiente (15°C à 30°C).
- Transportar em local seco, fresco e protegido da luz solar, à temperatura ambiente (15°C à 30°C).
- Transportar em sua embalagem própria.

Advertências e Precauções:

- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
- Não re-utilizar.
- A seringa não é indicada para uso de injeção hipodérmica.
- Produto médico hospitalar de uso único.
- Descartável.

Contra-Indicação:

- A seringa não é indicada para uso de injeção hipodérmica.

IMPORTADOR:

INTERMEDICAL SERVICE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Rua da Conceição, 125 - Sala 1011 - Centro - Niterói/RJ
CNPJ: 11.205.033/0001-94
Notificação ANVISA nº: 81931150003
Responsável Técnica: Paula Fontoura Coelho de Souza
- CRBIO-RJ 71021/02

FABRICANTE:

IDEH VARZAN FARDA (IVF) COMPANY
Nº 117, Building nº 2, Tehran Technology Park, Farshi Moghaddam (16th) Ave., North Amirabad Ave., Terã, Irã.

Prazo de validade: 3 anos.

REF	Número do catálogo	STERILE EO	Esterilizado por óxido de etileno
	Consulte as instruções de uso		Não reutilize
LOT	Lote		Proteja da luz solar
	Data de fabricação		Mantenha seco
	Usar antes de		Quantidade por caixa